

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ №364

Н.И. Чусовитина

Приказ №



**Инструкция по эксплуатации 2-х секционного телескопического пандуса
(STR016-5)**

2-х секционный телескопический пандус (STR016-5) используется для спуска/подъема инвалидных колясок на 1 этаже здания детского сада у входа со стороны двора. Предназначен для установки на марше лестницы 1 этажа, где установка стационарного пандуса мешает проходу пешеходов.

Пандус устанавливается ответственным лицом при прибытии (убытии) инвалида, маломобильного гражданина в(из) детский сад

Для установки пандуса необходимо:

1. взять упаковку с пандусом на шкафу в помещении вспомогательного персонала;
2. извлечь пандус из картонной упаковки, затем из мягкого футляра, путем расстегивания молнии;
3. взять один полз пандуса вертикально так чтобы фиксирующая желтая кнопка была под пальцами правой руки;
4. нажатием пальца на желтую кнопку удлинить пандус до щелчка (желтая кнопка в данном случае зафиксирует длину пандуса на другом его конце);
5. то же самое проделать со вторым ползом пандуса;
6. определить верхнюю и нижнюю части ползьев (концы ползьев имеют изгибы: верхняя часть —внутрь, нижняя - наружу);
7. каждый полз пандуса уложить на ступени лестничного марша 1 этажа на выходе (входе) во (со) двор(а), соответственно концами изогнутыми внутрь наверх, наружу - вниз (ширина между ползьями на более 50 см), проверить устойчивость ползьев (перед этим при необходимости, освободив проход от напольных покрытий);
8. после использования ползья пандуса очистить от грязи, протереть влажной ветошью, сложить в упаковку, убрать на место.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Чусовитина Наталия Игоревна

Действителен с 13.08.2021 по 13.08.2022